




CU-SP1 日常点検項目 ■■■■■■■ ✓

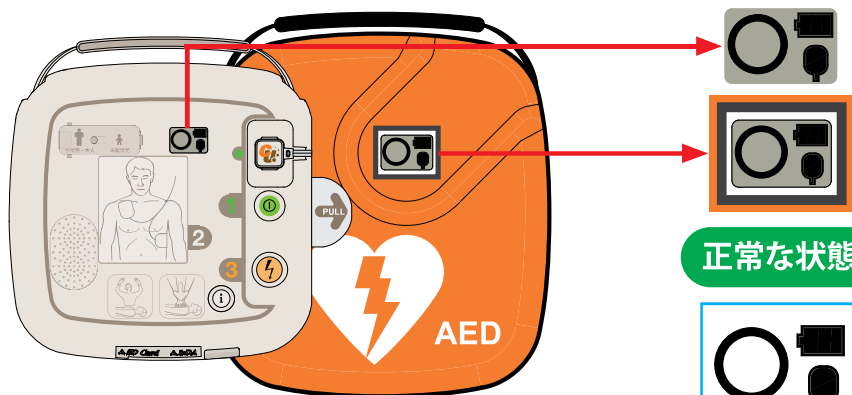

正常な状態

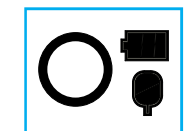

エラー状態

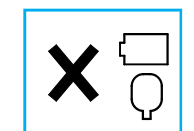

エラー状態表示



機器にエラーがあることを示しています。



バッテリー残量が不足していることを示しています。



両用電極パッドが、使用済、期限切れ、またはセルフテストでエラーを感知しました。

* 緊急時 (使用時)には119番に電話してください。

* 詳しい製品の使い方及び点検方法は、取扱説明書をご覧ください。

* 点検の結果、製品に異常がある場合は、販売店もしくは、コールセンターにお問い合わせください。

* AEDコールセンター: 0120-910-256

* 使用後は必ず電極パッドを交換してください。また、バッテリー装着テストを行ってください。



株式会社 CU
www.japan-cu.com

1) 販売店名: _____


2) 電話番号: _____

CU-SP1 日常点検表 ■■■■■■■ ✓

製品情報	設置年月日		
	シリアル番号	管理者氏名	

点検者氏名	年 月			年 月			年 月			
点検年月	年 月			年 月			年 月			
<div style="text-align: center;"> <p>正常な状態</p>  </div>	点検日									
	1	16	1	16	1	16	1	16		
	2	17	2	17	2	17	2	17		
	3	18	3	18	3	18	3	18		
	4	19	4	19	4	19	4	19		
	5	20	5	20	5	20	5	20		
	6	21	6	21	6	21	6	21		
	7	22	7	22	7	22	7	22		
	8	23	8	23	8	23	8	23		
	9	24	9	24	9	24	9	24		
	10	25	10	25	10	25	10	25		
	11	26	11	26	11	26	11	26		
	12	27	12	27	12	27	12	27		
	13	28	13	28	13	28	13	28		
	14	29	14	29	14	29	14	29		
15	30	15	30	15	30	15	30			
	31		31		31		31			

エラー状態

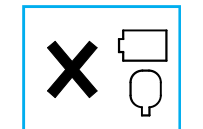

日常点検表記入例

正常な状態の時は○

エラー状態の時は×

日常点検表は下記よりダウンロードできます。

<http://www.japan-cu.com>