



医療機器承認番号 22100BZI00022000

高度管理医療機器、特定保守管理医療機器



IPAD

Intelligent Public Access Defibrillator

アイパッドNF1200

おてがるAED

- 簡単に操作が出来る、おてがるAED
- リファレンスガイド機能(救命工程がひと目でわかる)

心肺蘇生コーチング機能


- 大きくはっきりした、音声ガイダンス
- 1分間に100回以上のリズムでコーチング


IPAD

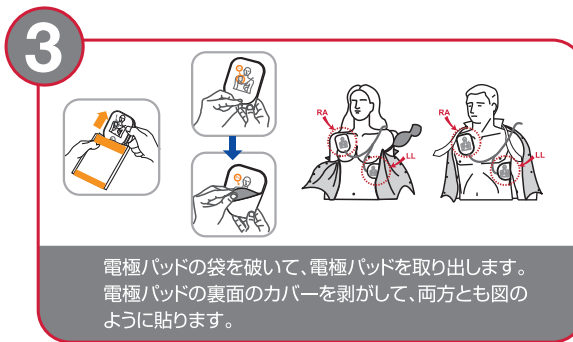
Intelligent Public Access Defibrillator

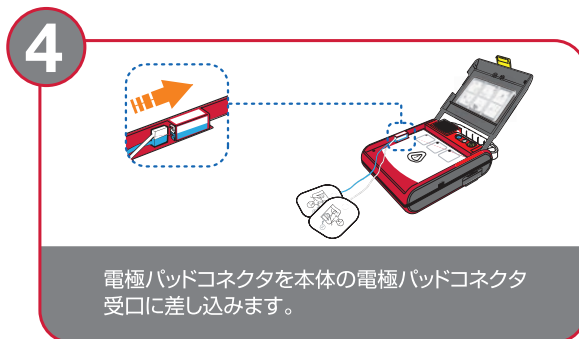
アイパッドNF1200


【アイパッドNF1200 使用法】


- 

電源を入れ、カバーを開けます。
- 

服を脱がせます。
- 

電極パッドの袋を破いて、電極パッドを取り出します。電極パッドの裏面のカバーを剥がして、両方とも図のように貼ります。
- 

電極パッドコネクタを本体の電極パッドコネクタ受口に差し込みます。
- 

<解析中>
離れてしばらく待ちます。
- 

指示が出たらショックボタンを押します。

【仕様】

販売名	アイパッド NF1200
電極パッド	使い捨て電極パッド
出力エネルギー	50Ω時150J
波形	二相性波形除細動(e-cube Biphasic)
バッテリー	DC12Vリチウム二酸化マンガンバッテリー (使い捨て長寿命一次電池)
バッテリー容量	200回の除細動(スタンバイ状態で4年間)
セルフテスト	毎日、毎週、4週毎
寸法・質量	220mm×281mm×82mm(W×L×H) 2.2kg(バッテリー含む)
メモリ	40分(心電図、イベント情報) PC転送可(赤外線通信)
ガイド機能	操作手順とガイドラインに適した CPRコーチングを音声で案内

【構成】



【消耗品】



【関連品】

アイパッド NF1200 トレーナ

- アイパッド NF1200本体のトレーニング用機器
- 8つの標準的シナリオ搭載
- 乾電池使用 (単3電池6本)
- アイパッド NF1200の機能をシミュレート



NFT2

! 日常点検を忘れずに!

AEDは救命処置のための医療機器です。AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジゲーターや消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

AEDコールセンター ☎ 0120-910-256

製造元
株式会社CUメディカルシステムズ
<http://www.cu911.com>

製造販売業者
株式会社CU
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10
虎ノ門桜通ビル8階
TEL:03-6205-7385 FAX:03-6205-7386
<http://www.japan-cu.com>

- * 取扱説明書及び注意書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- * 仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
- * AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、連絡してください。
- * 添付文書を必ずお読みください。
- * 電極パッドは1回限りの使い捨てです。