


# AED (アイパッド NF1200) の安全管理の手引き

## ★ 日常点検


アイパッド NF1200は、毎日自動でセルフテストをしています。  
セルフテストの結果は、中央のインジケータ (状態ランプ) に表示されます。

### 1. AEDの外観

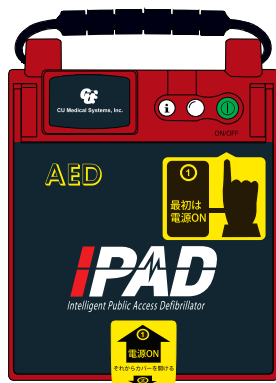

### 2. インジケータ (状態ランプ) の確認

#### 2-1. 使用可/不可を表すインジケータ (状態ランプ) の識別

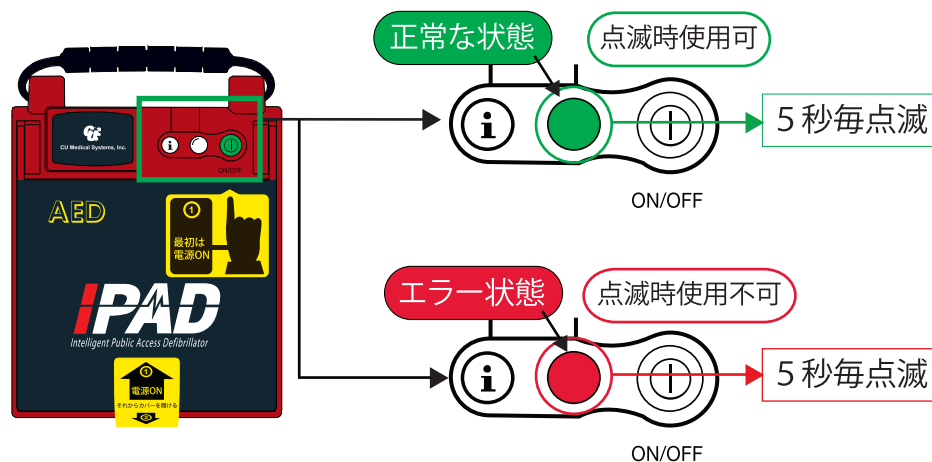

#### AED (アイパッド NF1200)の安全管理のお願い

AEDは救急処置のための医療機器です。AEDを設置したら、管理担当者を定めて、いつでも使用できるようにインジケータ (状態ランプ) や消耗品の有効期限を日頃から点検することが重要です。



連絡先  
株式会社 CU  
医療機器品質保証チーム  
電話：03-6205-7385

## 管理者がすべきこと

- 1) 毎日インジケータ(状態ランプ)を見て、正常な状態を確認する。  
(1ページ2-1項参照)
- 2) 点検結果を日常点検表に記録する。
- 3) エラー状態の場合には、販売店に連絡して、指示を仰ぐ。
- 4) 表示ラベルの取付けと、消耗品(電極パッド、バッテリーパック)の交換時期を記入。
- 5) 電極パッドの交換時期の確認。
- 6) バッテリーパックの交換時期の確認。
- 7) 添付文書を必ず読むこと。

## 表示ラベルの取付と記入要領

電極パッドとバッテリーの交換時期を明記してください。

**AED**  
消耗品交換時期

電極パッド	交換時期
大人・小児	年 月

電極パッド 交換時期  
大人・小児 年 月

バッテリー	交換時期
	年 月

△ バッテリーの寿命は装着から概4年です。  
(設置環境により異なる)

大人・小児いずれかに○をつけてください。

交換時期欄に電極パッドの交換時期(使用期限)を記入してください。

バッテリーの交換時期は、スタンバイ開始から4年が目安です。4年後の交換時期を記入してください。

**AED**  
消耗品交換時期

電極パッド	交換時期
大人・小児	年 月

電極パッド 交換時期  
大人・小児 年 月

バッテリー	交換時期
	年 月

△ バッテリーの寿命は装着から概4年です。  
(設置環境により異なる)


表示ラベルをAED本体に取り付けた状態

最初は電源ON

電源ON  
それからカバーを開ける

# 電極パッド交換要領と交換後の対応

表示ラベルに書かれた電極パッドの交換時期が1ヶ月前に近づきましたら、購入した販売店に連絡し、新しい電極パッドを購入してください。

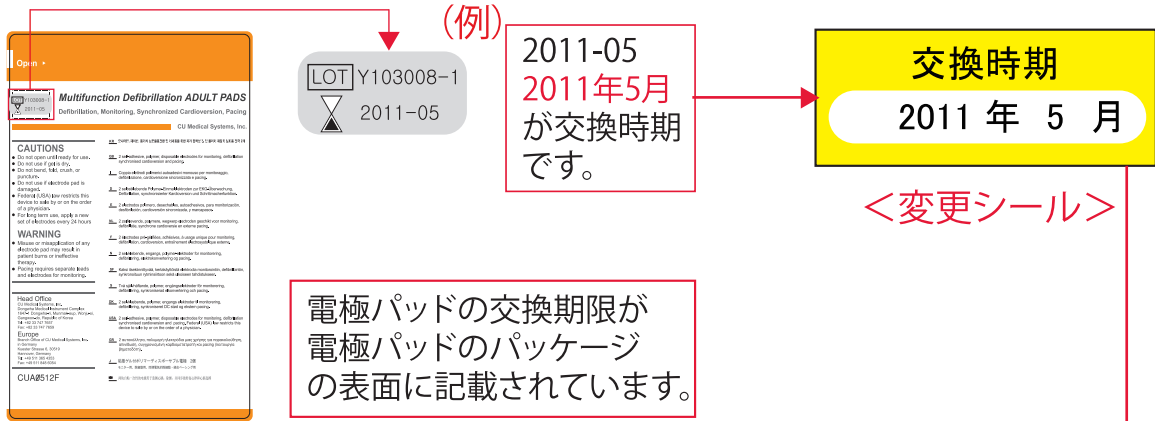

**AED**  
消耗品交換時期

電極パッド 大人・小児	交換時期 2009年5月
電極パッド 大人・小児	交換時期 年 月
バッテリー	交換時期 年 月


△ バッテリーの寿命は装着から概4年です。(設置環境により異なる)

**AED**  
消耗品交換時期

電極パッド 大人・小児	交換時期 2011年5月
電極パッド 大人・小児	交換時期 年 月
バッテリー	交換時期 年 月

△ バッテリーの寿命は装着から概4年です。(設置環境により異なる)

変更シールに交換時期を記入して、表示ラベルの該当箇所に貼り、AED本体に取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベルが収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。

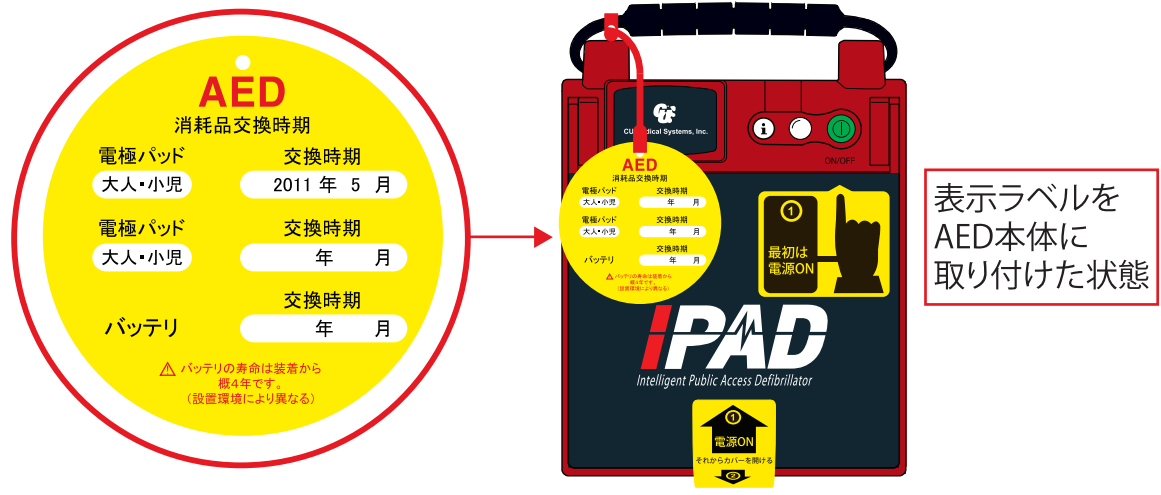

## バッテリー交換要領と交換後の対応

表示ラベルに書かれたバッテリーの交換時期が1ヶ月前に近づきましたら、購入した販売店に連絡し、新しいバッテリーを購入してください。

(例)

交換時期

2013年 11月

バッテリーの交換時期は、スタンバイ開始から4年が目安です。4年後の交換時期を記入してください。

<変更シール>



変更シールに交換時期を記入して、表示ラベルの該当箇所に貼り、AED本体に取り付けてください。収納ケース使用の際には、表示ラベルが収納ケースの窓を通して外から確認できるように収納してください。



表示ラベルをAED本体に取り付けた状態