


IPAD シューSPR

かんたん使用ガイド

1

電源ON・モード選択

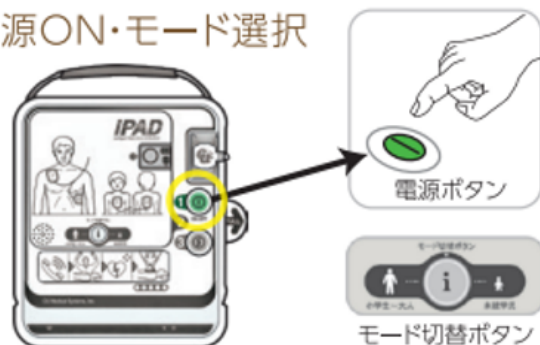

速やかに電源ボタンを押し、電源を入れます。
小学生~大人用モード又は未就学児用モードを選択します。

未就学児：およそ6歳未満のこども

2

衣服を脱がせる



上半身の衣服を脱がせて胸をはだけます。

時間を要する場合は衣服を切り裂きます。

3

電極パッドを貼る



機器の底面にある袋を破き、電極パッドを取り出してください。
電極パッドに示している図を確認して、図のように貼ってください。

電極パッドは必ず地肌に直接貼ってください。
未就学児は図のように胸と背中中央部に貼ります。

4

心電図解析




身体から離れてください。

傷病者に触れていると正確な解析が出来ません。

5

電気ショック

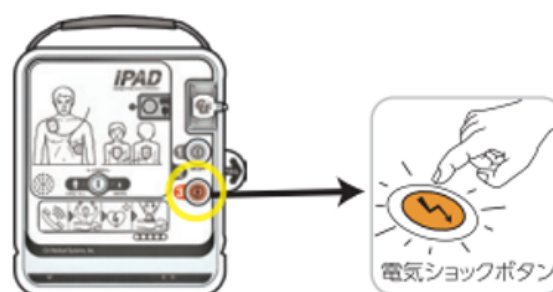


指示が出ましたら、点滅するオレンジ色の
ショックボタンを押してください。

感電する恐れがありますので、
傷病者に触れないでください。

6

CPR(心肺蘇生)

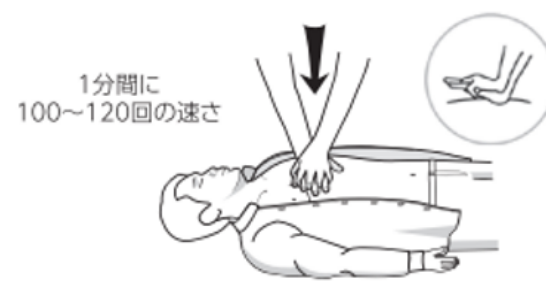

直ちに胸骨圧迫を行ってください。
できるなら人工呼吸も行ってください。

小学生~大人は5cm(6cmを超えない)
未就学児は胸の厚さの3分の1の深さまで